

	TÍTULO:	CÓDIGO:
	TOALLITAS LACLEDIN WIPES	FT-SGC014.02
	FECHA DE EMISIÓN:	REEMPLAZA:
	23/JUN/2020	FT-SGC014.01
		No. PÁG.:
		1 de 3

CONTENIDO

1. CARACTERISTICAS
2. FINALIDAD
3. CLASIFICACIÓN
4. PRESENTACIÓN
5. NÚMERO DE REFERENCIA
6. MODO DE EMPLEO
7. ADVERTENCIAS
8. IMAGEN

Realizado por:	Revisado/Aprobado por:
Firma/fecha	Firma/fecha

1. CARACTERISTICAS

- Toallitas desinfectantes para todas las superficies de productos sanitarios no invasivos.
- Espectro de acción:
 - Bactericida, incluyendo MRSA y VRE.
 - Fungicida
 - Virucida de espectro limitado.
 - Virus de la Hepatitis B (VHB)
 - Virus de la Hepatitis C (VHC)
 - Virus de la Hepatitis Delta (HDV)
 - VIH
 - Virus de la Influenza (humana, aviar y porcina)
 - Coronavirus (incluyendo SARS y MERS)
 - Herpesviridae
 - Filoviridae (incluye Ébola)
 - Rubeola
 - Rabia
 - Sarampión
- Estándares testados: EN 14885, EN 13727, EN 13624, EN 14476.
- Composición: Etanol, Propan-2-ol, Hidrocloruro de biguanida polimérica, aroma Dentomint.
- Mejor conservación: Bolsa sellado múltiple que las mantiene más húmedas.
- No decolora las superficies.
- Libres de aldehídos.
- Agradable aroma a limón.

2. FINALIDAD

Toallitas para desinfección de la superficie de productos sanitarios no invasivos. Especialmente para ambientes médicos y dentales.

3. CLASIFICACIÓN

Producto Sanitario Clase IIA.

4. PRESENTACIÓN

Toallitas Lacleдин Wipes. Bote con 100 toallitas.
Toallitas Lacleдин Wipes Refill. Bolsa recambio de 100 toallitas.

5. NÚMERO DE REFERENCIA

Ref: 07-011: LACLEDIN toallitas bote 100 u.
Ref: 07-017: LACLEDIN toallitas reposición 100 u.

6. MODO DE EMPLEO

- Quitar la tapa.
- Cortar la bolsa y sacar la primera toallita a través del orificio.
- Volver a colocar la tapa.
- Tirar de la toallita con un ángulo de 45°.
- Utilizar una nueva toallita para cada aplicación.
- Humedecer completamente la superficie a desinfectar y esperar al menos 60 segundos para que surta efecto.
- Dejar que se evapore el producto o secar con una toallita limpia.

7. ADVERTENCIAS

- No utilizar después de la fecha de caducidad.
- No utilizar sobre las superficies sensibles al alcohol.
- Sólo para uso profesional.
- Puede provocar una reacción alérgica.
- Provoca irritación ocular grave.
- Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- Mantener alejado del calor, fuego, chispas y superficies calientes.
- Almacenar en un lugar bien ventilado y fresco.
- Mantener el recipiente bien cerrado.
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- En caso de contacto con la piel, aclarar la piel con agua.
- En caso de contacto con los ojos, aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
- En caso de incendio, utilizar espuma resistente al alcohol o dióxido de carbono para la extinción.

8. IMAGEN

