

	TÍTULO: TERMÓMETRO INFRARROJO	CÓDIGO: FT-SGC58.01
	FECHA DE EMISIÓN: 11/AGO/2020	REEMPLAZA: N/A
		No. PÁG.: 1 de 4

CONTENIDO


1. CARACTERISTICAS
2. FINALIDAD
3. CLASIFICACIÓN
4. PRESENTACIÓN
5. NÚMERO DE REFERENCIA
6. MODO DE EMPLEO
7. ADVERTENCIAS
8. IMAGEN

Realizado por:	Revisado/Aprobado por:
Firma/fecha	Firma/fecha

Queda prohibida la divulgación, utilización, reproducción total o parcial de su contenido sin previa autorización formal expedido por **Laboratorios Clarben, S.A.**
Los documentos impresos o descargados deben ser verificados frente a la versión vigente.

1. CARACTERÍSTICAS

- Dispositivo infrarrojo no estéril y reutilizable.
- Unidades de medida: Celsius (°C) y Fahrenheit (°F).
- Condiciones de uso: entornos entre 16-35°C (60.8-95°F) con humedad relativa entre 15-80%.
- Condiciones de almacenaje: entornos entre -20°C- + 55°C (-4°F a 131°F) con humedad relativa entre 15-93 %.
- Distancia de medición: 15-50 mm del centro de la frente/sien.
- Rango de medición en la frente/sien: 32.0°C-42.2°C (89.6°F- 108°F).
- Exactitud de medición: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ (35.0 °C-42.0°C) $\pm 0.4^{\circ}\text{F}$ (95.0°F- 107.6°F).
- 32 memorias disponibles.
- Dimensiones: 144 mm x 101mm x 36mm.
- Peso: 88 gramos (sin baterías).
- Baterías: 2X AAA batería (DC.3V).
- Este termómetro ha sido calibrado en el momento de su fabricación. Si el termómetro es usado acorde a su manual, no es necesario volver a calibrar.
- Apagado automático después de 1 minuto.

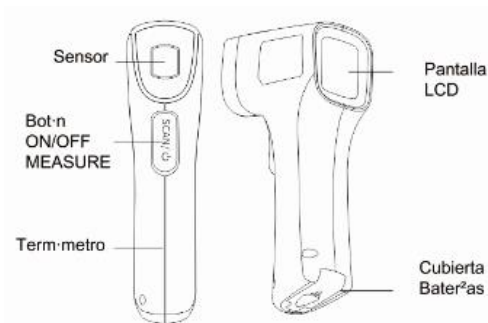

2. FINALIDAD

Dispositivo para la medición de la temperatura corporal a partir de 3 meses de edad, mediante la detección por infrarrojos de la temperatura en la frente/sien.

3. CLASIFICACIÓN

Producto Sanitario clase IIA.

4. PRESENTACIÓN

Termómetro infrarrojo individual.

5. NÚMERO DE REFERENCIA

09-085: TERMÓMETRO INFRARROJO.

6. MODO DE EMPLEO

1. Encienda el termómetro presionando el botón ON/OFF MEASURE, para elegir el modo presione ON/OFF MEASURE. Un sonido alertará del inicio al mismo tiempo que en la pantalla parpadeará el símbolo "°C", indicando que el termómetro está preparado para su uso.

2. Coloque el termómetro a una distancia de 15-50 mm del centro de la frente y presione el botón ON/OFF MEASURE. El termómetro emitirá un sonido y aparecerá la lectura de la temperatura en la pantalla. Para lecturas posteriores, espere a que aparezca el símbolo °C. Este proceso podrá ser repetido las veces que se requiera.



3. Apague el termómetro presionando y manteniendo pulsado el botón ON/OFF MEASURE durante 5 segundos. No obstante, el termómetro se apagará automáticamente al cabo de 60 segundos.

Si desea cambiar la escala de temperatura:

- a) Asegúrese que el termómetro está apagado.
- b) Presione el botón ON/OFF MEASURE durante 8 segundos para poner el termómetro en modo memoria. La actual escala de temperatura aparece en la pantalla.
- c) Suelte y presione el botón ON/OFF MEASURE de nuevo para elegir entre las dos opciones (°C ó °F) que aparecen en la pantalla.
- d) El termómetro se apagará automáticamente después de su uso.

7. ADVERTENCIAS

- No sumerja el termómetro en agua o en otros líquidos.
- No use un teléfono móvil cerca del termómetro cuando esté tomando la temperatura.
- No toque o sople el sensor de infrarrojos.
- No use el termómetro a temperaturas extremas por debajo de 16°C o por encima de 35°C ni con humedad relativa inferior al 15% o superior al 93%.
- Limpie el sensor del termómetro suavemente con un algodón humedecido en alcohol etílico. Cuando el alcohol se seque, puede volver a usar el termómetro.
- No limpiar con agua, detergente y/o productos abrasivos.
- El sensor de cristal de este termómetro está hecho de un material especial difícil de romper. Si existe algún daño deje de usar el termómetro y contacte con el distribuidor.
- Instale las baterías en la posición correcta.
- Retire las baterías del termómetro si no lo va a usar durante un periodo largo de tiempo. Cuando el icono de batería esté parpadeando, se requiere el cambio de la batería. Presione y deslice la cubierta hacia arriba para retirarla.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

8. IMAGEN

