	TÍTULO:	CÓDIGO:
	<b>CADENETA DE ORTODONCIA</b>	<b>FT-SGC071.01</b>
	FECHA DE EMISIÓN:	REEMPLAZA:
	<b>16/03/2021</b>	<b>N/A</b>
		No. PÁG.:
		<b>1 de 3</b>

## CONTENIDO

1. CARACTERISTICAS
2. FINALIDAD
3. CLASIFICACIÓN
4. PRESENTACIÓN
5. NÚMERO DE REFERENCIA
6. MODO DE EMPLEO
7. ADVERTENCIAS
8. IMAGEN


<b>Realizado por:</b>	<b>Revisado/Aprobado por:</b>
<b>Firma/fecha</b>	<b>Firma/fecha</b>

Queda prohibida la divulgación, utilización, reproducción total o parcial de su contenido sin previa autorización formal expedido por **Laboratorios Clarben, S.A.**

*Los documentos impresos o descargados deben ser verificados frente a la versión vigente.*

## 1. CARACTERÍSTICAS

- Cadeneta de ortodoncia elastomérica termoformada a base de polímeros de goma elástica.
- Son ligaduras elásticas que se unen entre ellas formando una cadena y complementa al aparato fijo de ortodoncia.
- Ofrecen sujeción a brackets y gran resistencia a la tracción.
- Esta cadeneta elástica, permite al odontólogo abarcar varios dientes a la vez y realizar los movimientos dentales necesarios.
- Forma de los anillos especialmente plana, ideal para técnica lingual y para múltiples ligaduras.
- Gran resistencia a la rotura.
- Existen tres tipos de uniones de las ligaduras elásticas para adaptarse a las necesidades de cada tratamiento.
- Formato cadeneta abierta (3.5 mm), cerrada (2.8 mm) y larga (4.0 mm), disponibles en color gris o transparente.

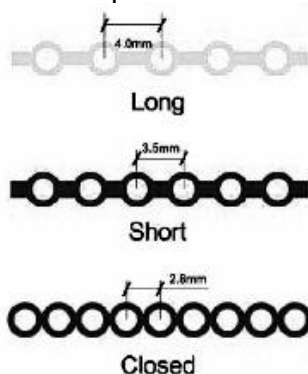

## 2. FINALIDAD

- Producto indicado para cerrar o abrir espacios entre los dientes, corregir rotaciones de incisivos y premolares.

## 3. CLASIFICACIÓN

- Producto Sanitario clase IIa.

## 4. PRESENTACIÓN

- Cadeneta elástica de ortodoncia en rollo.

## 5. NÚMERO DE REFERENCIA

- 03-081 Cadeneta elástica Cerrada 2.8 mm/ rollo gris.
- 03-082 Cadeneta elástica Cerrada 2.8 mm/ rollo transparente
- 03-083 Cadeneta elástica Abierta 3.5 mm/ rollo gris
- 03-084 Cadeneta elástica Abierta 3.5 mm/ rollo transparente
- 03-085 Cadeneta elástica Larga 4.0 mm/ rollo gris
- 03-086 Cadeneta elástica Larga 4.0 mm/ rollo transparente

## 6. MODO DE EMPLEO

- Desenrollar la cadeneta
- Cortar la cadeneta de acuerdo a la longitud requerida
- Insertar cada eslabón de la cadeneta en cada pieza de bracket

**7. ADVERTENCIAS**

- Producto de un solo uso
- Este producto está indicado únicamente para uso profesional
- Almacenar en lugar libre de humedad.

**8. IMAGEN**