

 Laboratorios Clarben S.A.	TÍTULO:	CÓDIGO:
	MASCARILLA FFP2 NEGRA	FT-SGC076.01
	FECHA DE EMISIÓN:	REEMPLAZA:
	24/MAR/2021	N/A
		No. PÁG.:
		1 de 3

CONTENIDO

1. CARACTERISTICAS
2. FINALIDAD
3. CLASIFICACIÓN
4. PRESENTACIÓN
5. NÚMERO DE REFERENCIA
6. MODO DE EMPLEO
7. ADVERTENCIAS
8. IMAGEN

Realizado por:	Revisado/Aprobado por:
Firma/fecha	Firma/fecha

Queda prohibida la divulgación, utilización, reproducción total o parcial de su contenido sin previa autorización formal expedido por **Laboratorios Clarben, S.A.**

Los documentos impresos o descargados deben ser verificados frente a la versión vigente.

1. CARACTERÍSTICAS

- Mascarilla de ultra protección FFP2 que cumple con la norma EN-149:2001 + A1:2009.
- Protección cómoda contra infecciones con excelente transpirabilidad.
- Eficiencia de filtración $\geq 95\%$.

2. FINALIDAD

- Las mascarillas FFP2 están diseñadas para filtrar las partículas y aerosoles líquidos presentes en el medio ambiente, impidiendo que sean inhaladas por el usuario y protegiendo al mismo.

3. CLASIFICACIÓN

- Equipo de Protección Individual (EPI).

4. PRESENTACIÓN

- MASCARILLAS FFP2 NEGRA

5. NÚMERO DE REFERENCIA

- 14-025: MASCARILLA FFP2 CAJA 10 UNIDADES.

6. MODO DE EMPLEO

- Antes de ponerse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón durante 40-60 segundos.
- Abra la máscara plegable y colóquesela cuidadosamente sobre nariz y boca ajustándola firmemente en la parte superior de la nariz para que no haya grandes espacios de separación con la cara. Por último, ajuste las gomas elásticas de la mascarilla por la parte de atrás de las orejas para que quede perfectamente colocada, y amolde la pinza nasal a la parte superior de la nariz.
- Asegúrese de poder respirar bien y ajústese si es necesario.
- Evite tocar la mascarilla mientras se lleve puesta. Si lo hace, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
- Quítesela con la técnica correcta: por detrás, sólo tocando las gomas elásticas, y sin tocar la parte frontal de la mascarilla.
- Desechar la mascarilla en una bolsa de plástico, y deposítela cerrada en la basura.

- Después de quitarse la mascarilla, lávese las manos con una solución hidroalcohólica, o con agua y jabón si están visiblemente sucias durante 40-60 segundos.



7. ADVERTENCIAS

- En cuanto la mascarilla esté húmeda, sustituirla por otra limpia y seca.
- Cambie la máscara inmediatamente si la respiración se vuelve difícil o la máscara se daña o se distorsiona.
- Condiciones de almacenaje: temperatura de -20°C a 40°C y humedad relativa menos del 80%.
- Evite que las cajas se vean afectadas por la humedad, se mojen y la exposición de las mismas al sol.

8. IMAGEN

